

microlife

100%
WATERPROOF
4-DIGIT
LARGE DISPLAY
1 DATA
MEMORY

Digital Classic
Thermometer



BB MT 16C2 Var4 4207

DIGITAL CLASSIC THERMOMETER
MT 16C2

DESCRIPTION OF THIS PRODUCT

Описание продукта
OPIS PRODUKTU
A TERMÉK LEÍRÁSA



Measuring sensor
Измерительный датчик
Czujnik pomiarowy
Erzékelő fej

Display Field
Дисплей
Wyświetlacz
Kijelző

ON/OFF button
Кнопка Вкл/Выкл
Przycisk ON/OFF (wl./wyt.)
Ki/be kapcsoló

Battery compartment cover
Крышка отделения для батарей
Pokrywka pojemnika na baterię
Elemtartó fedél



100% waterproof
100%-ная водонепроницаемость
100% wodoszczelny
100%-osan vízálló



Signal Tone
Звуковой сигнал
Sygnał dźwiękowy
Hangjelzés



Memory
Память
Pamięć
Memória

MEASURING METHODS / Способы измерения
METODY POMIAROWE / MÉRÉSI MÓDOK

Method	Duration	Temperature Range
Oral орально W ustach Szájban	60 seconds 1 минута 60 sekund 1 perc	Normal 35.7 °C – 37.3 °C
Rectal ректально W odbycie Végbélben	60 seconds 1 минута 60 sekund 1 perc	36.2 °C – 37.7 °C
Axillar аксиллярно Pod ramię Hónaljban	5-10 minutes * 5 до 10 минут * 5-10 minut * 5-10 perc *	35.2 °C – 36.7 °C

* 5 minutes after beeping (depending on ambient temperature)
* 5 минут после звукового сигнала (в зависимости от окружающей температуры)
* 5 minut po sygnale dźwiękowym (w zależności od temperatury otoczenia)
* 5 perccel a sipelő hang után (a környezeti hőmérséklettől függően)

CLEANING AND DISINFECTION / Очистка и дезинфекция
CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA / TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

Name / средства / Srodek / Neve	Immerse / Погружение / Zanurzyc / Tárolhatóság
Isopropyl alcohol 70% Спирт этиловый для наружного применения	max. 24 hours Погружение на 24 часа

BATTERY REPLACEMENT / ЗАМЕНА БАТАРЕИ / WYMIANA BATERII / ELEMCSERE

When the «▼»-symbole appears, battery is exhausted and needs replacing. Please remove the compartment lid of the thermometers and replace the exhausted battery by positioning the + at the top.

Появление в правом нижнем углу дисплея символа «▼» означает, что батарея исчерпала свой ресурс и нуждается в замене. Замените использованную батарею, установив новую знаком + вверх.

Kiedy w prawym dolnym rogu pojawia się symbol odwróconego trójkąta «▼», oznacza to, że bateria jest zużyta i należy ją wymienić. W tym celu zdejmij pokrywke pojemnika na baterię. Upewnij się, że jest to bateria tego samego typu, a następnie wymień ją, umieszczając biegunem + ku górze.

Amikor a «▼» (fejére állított háromszög) szimbólum megjelenik a kijelző jobb felső sarkában, akkor az elem kimerült, cserélje ki azt. Az elem kicseréléséhez távolítsa el az elemtartó fedelét. Az új elemet a «+» jellel felfelé helyezze be. Mindig ugyanolyan típusú elemet használjon.

Microlife AG
Espanstrasse 139
9443 Widnau / Switzerland
Tel. +41 / 71 727 70 30
Fax +41 / 71 727 70 39
Email admin@microlife.ch
www.microlife.com



Микрولайф АГ
Эспенштрассе 139
9443 Виднау/Швейцария
Тел. +41/71 727 70 30
Факс. +41/71 727 70 39
E-mail: admin@microlife.ch
www.microlife.com

microlife®

Термометр медицинский электронный
guarantee (excl. battery)

CLINICALLY TESTED
CE0044



SWISS
DESIGN

CLINICALLY TESTED

36.9

Memory
Alarm
Memory
Memory

Signal Tone
Signal screen
Hangover



100% waterproof
100%-ная водонепроницаемость
100% an vizialo

www.microlife.com



Read the instructions carefully before using this device.
Figyeljen a használati utasításra gondosan, mielőtt elkezdi használni a készüléket.
Próbálgatás előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
Type Bf applied part

Table with 2 columns: English and Hungarian. English: Warranty, Features, Specifications, etc. Hungarian: Garancia, Jellemzők, Műszaki adatok, etc.

MŰSZAKI ADATOK
Típus / Type: Termométer maximumtűrési osztályban
Zakartes pontosság / Measured range: 0,2-30,0 °C és 42,99 °C
Doklátozott pontosság / Measured accuracy: ± 0,1 °C között, 34 °C és 42 °C között
Szenzorok típusa / Sensor type: PT1000 típusú hőérzékelő (PT1000 típusú hőérzékelő)

Table with 2 columns: English and Hungarian. English: Technical specifications, Safety instructions, etc. Hungarian: Műszaki specifikációk, Biztonsági utasítások, etc.

Fontos biztonsági tanácsok
A hőmérőt csak tisztított állapotban használja.
A hőmérőt csak tisztított állapotban használja.
A hőmérőt csak tisztított állapotban használja.

Garancia
A készülék 2 éves garanciával rendelkezik.
A készülék 2 éves garanciával rendelkezik.
A készülék 2 éves garanciával rendelkezik.

Fontos biztonsági tanácsok
A hőmérőt csak tisztított állapotban használja.
A hőmérőt csak tisztított állapotban használja.
A hőmérőt csak tisztított állapotban használja.

Table with 2 columns: English and Hungarian. English: Technical specifications, Safety instructions, etc. Hungarian: Műszaki specifikációk, Biztonsági utasítások, etc.

Fontos biztonsági tanácsok
A hőmérőt csak tisztított állapotban használja.
A hőmérőt csak tisztított állapotban használja.
A hőmérőt csak tisztított állapotban használja.

RU

EN