

microlife

100%
WATERPROOF
ILLUMINATED
JUMBO DISPLAY
MEMORY
DATA

Digital Jumbo LCD
Thermometer




lifetime
guarantee

BB MT 18A1-N Var1 1007

DIGITAL JUMBO LCD THERMOMETER
MT 18A1-N

DESCRIPTION OF THIS PRODUCT
DESCRIPTION DU PRODUIT
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO

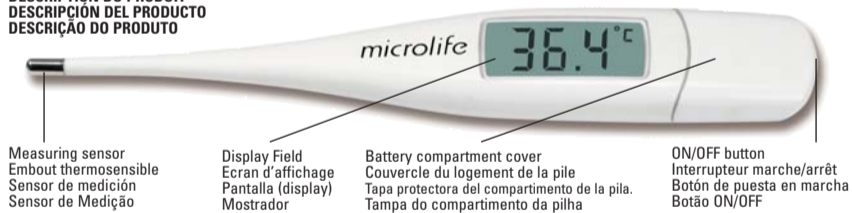

Measuring sensor
Embout thermosensible
Sensor de medición
Sensor de Medição

Display Field
Ecran d'affichage
Pantalla (display)
Mostrador

Battery compartment cover
Couvercle du logement de la pile
Tapa protectora del compartimento de la pila.
Tampa do compartimento da pilha

ON/OFF button
Interrupteur marche/arrêt
Botón de puesta en marcha
Botão ON/OFF

Illuminated display
Luminescence de l'écran
Función Display con Luz
Brilha no escuro

100% waterproof
Etanchéité totale
100% resistente al agua
100% à prova de água

Signal Tone
Signal sonore
Señal acústica
Sinal sonoro

Memory
Mémoire
Memoria
Memória

MEASURING METHODS / METHODES DE MESURE
TIPOS DE MEDICIÓN / MÉTODOS DE MEDIÇÃO

Method	Icon	Duration	Temperature Range
Oral Dans la bouche Via oral Na boca		60 seconds 60 secondes 60 segundos 60 segundos	Normal 35.7 °C – 37.3 °C
Rectal Dans le rectum Via rectal No ânus		60 seconds 60 secondes 60 segundos 60 segundos	36.2 °C – 37.7 °C
Axillar Sous l'aisselle Via axilar Debaixo do braço		5–10 minutes * 5–10 minutes * 5 a 10 minutos * 5–10 minutos *	35.2 °C – 36.7 °C

* 5 minutes after beep tone (depending on ambient temperature)
* 5 minutes après le bip sonore (en fonction de la température ambiante)
* 5 minutos después del pitido (dependiendo de la temperatura ambiente)
* 5 minutos após o sinal sonoro «bip» (dependendo da temperatura ambiente)

CLEANING AND DISINFECTION / NETTOYAGE ET DESINFECTION DU THERMOMETRE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN / LIMPEZA E DESINFECCÃO

Name / Nom / Nombre / Nome	Immerse / Immersion / Inmersión / Mergulhar
Isopropyl alcohol 70%	max. 24 hours

BATTERY REPLACEMENT / REMPLACEMENT DE LA PILE / CAMBIO DE PILA / SUBSTITUIÇÃO DA PILHA

When the «▼»-symbole appears, battery is exhausted and needs replacing. Please remove the compartment lid of the thermometers and replace the exhausted battery by positioning the + at the top.

Lorsque le symbole «▼» s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran, la pile est usée et doit être changée. Remplacer la pile usée par une nouvelle pile du même type en veillant à bien orienter la borne positive (+) vers le haut.

En cuanto aparece a la derecha del display el símbolo «▼», significa que la pila se ha agotado y es necesario cambiarla. Para ello debe levantar la tapa protectora del compartimento de la pila y colocar la nueva pila de manera que la cara con el signo «+» quede mirando hacia arriba.

Quando o símbolo «▼» aparecer no canto inferior direito do mostrador, a pilha está descarregada e necessita de ser substituída. Retire a tampa do compartimento da pilha e substitua a pilha descarregada, assegurando-se que o sinal + fica para cima.

Microlife AG
Epenstrasse 139
9443 Widnau / Switzerland
Tel. +41 / 71 727 70 30
Fax +41 / 71 727 70 39
Email admin@microlife.ch
www.microlife.com

microlife

lifetime guarantee
(excl. battery)



SWISS
DESIGN

