



2 роки гарантії

GoldTemp Thermometer MT 1931

BC MT 1931 GT V3-UA 1308

DESCRIPTION OF THIS PRODUCT
Описание продукта
ОПИС ТЕРМОМЕТРА



Measuring sensor / Gold Tip
Измерительный датчик / наконечник с золотым покрытием
Вимірковальний сенсор / наконечник з золотим покриттям



Flexible tip
Гибкий наконечник
Гнучкий кінець



100% waterproof
100%-ная водонепроницаемость
100% водонепроникність



Signal Tone
Звуковой сигнал
Звуковий сигнал



Memory
Память
Пам'ять

¹ no nickel in direct contact with the skin / ¹ нет прямого контакта никеля с кожей / ¹ немає прямого контакту нікеля зі шкірою



Display Field
Дисплей
Дисплей

ON/OFF button
Кнопка Вкл/Выкл
Кнопка УВІМК/ВИМКН

Battery compartment cover
Крышка отделения для батарей
Кришка батарейного відсіку

MEASURING METHODS / Способы измерения / Способи вимірювання

Method	Duration	Normal Range
Oral орально орально	60 seconds 1 минута 60 секунд	35.7 °C – 37.3 °C
Rectal ректально ректально	60 seconds 1 минута 60 секунд	36.2 °C – 37.7 °C
Axillar аксиллярно аксиллярно	5-10 minutes* 5 до 10 минут* 5-10 хвилин*	35.2 °C – 36.7 °C

* 5 minutes after beep tone (depending on ambient temperature)
* 5 минут после звукового сигнала (в зависимости от окружающей температуры)
* 5 хвилин після звукового сигналу (в залежності від навколишньої температури)

CLEANING AND DISINFECTION / Очистка и дезинфекция / Очищення і дезінфекція

Name / средства / Засоби	Immerse / Погружение / Занурення
Isopropyl alcohol 70%	max. 24 hours
Спирт этиловый для наружного применения	Макс. погружение на 24 часа
Спирт этиловый для внешнего застосування	Макс. занурення на 24 години

BATTERY REPLACEMENT / ЗАМЕНА БАТАРЕИ / ЗАМІНА БАТАРЕЇ

When the «▼»-symbole appears, battery is exhausted and needs replacing. Please remove the compartment lid of the thermometers and replace the exhausted battery by positioning the + at the top.

Появление в правом нижнем углу дисплея символа «▼» означает, что батарея исчерпала свой ресурс и нуждается в замене. Замените использованную батарею, установив новую знаком + вверх.

З'явлення на дисплеї символу «▼» (перевернутий трикутник) означає, що батарея розряджена і потребує заміни. Для заміни батареї зніміть кришку батарейного відсіку з термометра. Вставте нову батарею полюсом «+» доріг.

Microlife AG
Espanstrasse 139
9443 Widnau / Switzerland
Tel. +41 / 71 727 70 30
Fax +41 / 71 727 70 39
Email admin@microlife.ch
www.microlife.com
www.microlife.com.ua




Термометр медичинський електронний
Термометр медичинський електронний
guarantee (excl. battery) CLINICALLY TESTED CE0044



4 71900 3 060 015