

microlife



100%
WATERPROOF
ANALLERGIC,
TOUCH
FLEXIBLE
TIP
GoldTemp
Thermometer



new
Gold Tip

BC MT 1931 GT VarA 4606

GoldTemp Thermometer MT 1931

DESCRIPTION OF THIS PRODUCT DESCRIPTION DU PRODUIT DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO GERÄTEBESCHREIBUNG



Measuring sensor / Gold Tip
Embout thermosensible / Embout doré
Sensor de medición / Punta de oro
Mess-Sensor / Gold-Spitze

Display Field
Ecran d'affichage
Visor (display)
Anzeige-Sichtfeld

ON/OFF button
Interrupteur marche/arrêt
Botón de puesta en marcha
Ein-/Aus-Taste

Battery compartment cover
Couvercle du logement de la pile
Tapa protectora del compartimento de la pila.
Batterie-Abdeckung



Anallergic¹
Anallergique¹
Hipoalergénico¹
Antiallergisch¹

Flexible tip
Sonde flexible
Punta flexible
Flexible Spitze

100 % waterproof
Étanchéité totale
100% resistente al agua
100% Wasserdicht

Signal Tone
Signal sonore
Señal acústica
Signalton

Memory
Mémoire
Memoria
Speicher

¹ no nickel in direct contact with the skin / ¹ sans nickel en contact direct avec le corps
¹ el nickel no entra en contacto directo con la piel / ¹ kein Nickel in direktem Kontakt mit der Haut

MEASURING METHODS / METHODES DE MESURE TIPOS DE MEDICIÓN / MESSARTEN

Method	Duration	Temperature Range
Oral Dans la bouche Vía oral Oral	60 seconds 60 secondes 60 segundos 60 Sekunden	Normal 35.7 °C – 37.3 °C
Rectal Dans le rectum Vía rectal Rektal	60 seconds 60 secondes 60 segundos 60 Sekunden	36.2 °C – 37.7 °C
Axillary Sous l'aisselle Vía axilar Axillar	5–10 minutes * 5–10 minutes * 5 a 10 minutos * 5–10 Minuten *	35.2 °C – 36.7 °C

* 5 minutes after beeptone (depending on ambient temperature)
* 5 minutes après le bip sonore (en fonction de la température ambiante)
* 5 minutos después del pitido (dependiendo de la temperatura ambiente)
* 5 Minuten nach Piepton (je nach Umgebungstemperatur)

CLEANING AND DISINFECTION / NETTOYAGE ET DESINFECTIION DU THERMOMETRE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN / REINIGUNG UND DESINFESTION

Name / Nom Nombre / Name	Immerse / Immersion Inmersión / Eintauchen
Isopropyl alcohol 70%	max. 24 hours

BATTERY REPLACEMENT / REMPLACEMENT DE LA PILE / CAMBIO DE PILA / BATTERIEWECHSEL

When the «▼»-symbole appears, battery is exhausted and needs replacing. Please remove the compartment lid of the thermometers and replace the exhausted battery by positioning the + at the top.

Lorsque le symbole «▼» s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran, la pile est usée et doit être changée. Remplacer la pile usée par une nouvelle pile du même type en veillant à bien orienter la borne positive (+) vers le haut.

En cuanto aparece a la derecha del display el símbolo «▼», significa que la pila se ha agotado y es necesario cambiarla. Para ello debe levantar la tapa protectora del compartimento de la pila y colocar la nueva pila de manera que la cara con el signo «+» quede mirando hacia arriba.

Sobald rechts in der LCD-Anzeige das Symbol «▼» erscheint, ist die Batterie erschöpft und ein Batteriewechsel fällig. Dazu ziehen Sie die Abdeckung des Batteriefachs ab und ersetzen die erschöpfte Batterie mit dem + Zeichen nach oben.

Microlife AG
Espanstrasse 139
9443 Widnau / Switzerland
Tel. +41 / 71 727 70 30
Fax +41 / 71 727 70 39
Email admin@microlife.ch
www.microlife.com

microlife®



lifetime guarantee (excl. battery)

CLINICALLY TESTED



CE0044

