

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

- Прилад можна використовувати тільки для вимірювання температури тіла.
- Необхідно обов'язково витримувати мінімальний час вимірювання до появи звукового сигналу.
- Термометр містить дрібні деталі (батареї та ін.), які дитина може спробувати проковтнути, тому ніколи не давайте термометр дитині без нагляду!
- Оберегайте прилад від ударів і падінь.
- Уникайте температури навколишнього середовища вище 60 °C і ні в якому разі не кип'ятіть прилад.
- Для очищення термометра використовуйте тільки ті засоби, які приведені в розділі «Очищення і дезинфекція».
- Ми рекомендуємо перевіряти точність приладу кожні два роки або після механічного удару (наприклад, падіння). Будь ласка, зверніться до сервісної служби MicroLife для здійснення перевірки.

Батареї й електронні прилади слід утилізувати відповідно до прийнятних норм і не викидати разом із побутовими відходами.

UA

Звуковий сигнал в термометрі не говорить про закінчення вимірювання, необхідно продовжувати вимірювання 90 секунд після звукового сигналу, в залежності від навколишньої температури.

Для збільшення строку служби батареї вимикайте термометр коротким натисненням кнопки УВІМК/ВИМКН. Інакше термометр вимкнеться автоматично приблизно через 10 хвилин.

ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ

При натисненні кнопки УВІМК/ВИМКН довші ніж 3 секунди при ввімкненні термометра на дисплеї відображається максимальна температура, автоматично збережена під час останнього вимірювання. Одночасно, на дисплеї відображається символ «М», що означає пам'ять. Через 3 секунди індикація зникне, і термометр готовий до нового вимірювання. Потім збережений результат буде видалено з пам'яті.

ГАРАНТІЯ

Ми даємо Вам 2 роки гарантії від дати покупки. Дана гарантія не розповсюджується на пошкодження, що викликані неправильним поводженням із приладом. Гарантія також не розповсюджується на батареї та упакування. Будь-які вимоги по відшкодуванню іншого пошкодження приладу виключені. Гарантійні претензії повинні подаватися з документом, що підтверджує покупку. Будь ласка, зверніться до найближчої гарантійної майстерні Мікролайф.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип:	Термометр максимальних показань
Діапазон вимірювань:	від 32.0 °C до 42.9 °C Темп. < 32.0 °C: відображається «--» (дуже низька температура) Темп. > 42.9 °C: відображається «Н» (дуже висока температура)
Точність вимірювань:	± 0.1 °C у діапазоні від 34 °C до 42 °C при температурі
Діапазон робочих температур:	18 °C до 28 °C
Самоконтроль:	Автомат. внутр. функціональний тест при контр. показнику 37.0 °C при відхиленні більш 0.1 °C відображається показник «ERR» (помилка)
Дисплей:	Рідкокристалічний дисплей з трьома цифровими позиціями. Точність вимірювання: 0.1 °C
Звуковий сигнал:	Використовується як сигнал про готовність до вимірювання, а також для повідомлення про те, що підвищення темп-ри складає менш ніж 0.1 °C / 8 сек.
Пам'ять:	Для збереження останнього результату вимірювання
Температура зберігання:	Від -10 °C до +60 °C
Батарея:	1,5 / 1,55 V; SR 41
Відповідність стандартам:	EN12470-3: 2000 г., медичні термометри. ASTM E-1112, електронні термометри

УВІМКНЕННЯ ТЕРМОМЕТРА

Для ввімкнення термометра натисніть кнопку УВІМК/ВИМКН, яка знаходиться у верхній частині приладу. Короткий звуковий сигнал інформує про ввімкнення термометра. Здійснюється тест дисплея. Всі сегменти повинні з'явитися на дисплеї. Потім, при температурі навколишнього середовища менше ніж 32 °C, на дисплеї з'являється символ «--» і миготливий символ «°C». Тепер термометр готовий до роботи.



ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМОМЕТРА

Оберіть метод вимірювання. Під час вимірювання на дисплеї безупинно відображається поточна температура, а символ «°C» мигає увесь цей час. Якщо пролунає 10 коротких звукових сигналів «біп» і символ «°C» перестане миготіти - збільшення температури в цей час становить менше ніж 0,1 °C за 8 секунд.

Дата покупки:

Свідоцтво про державну реєстрацію № 2471/2004 від 31.01.04.
Сертифікат затвердження № UA-MI/1p-1365-2003 номер Y1748-03.
Дата виготовлення: перші три цифри серійного номеру приладу. Перша та друга - тиждень виготовлення, третя - рік виготовлення.

www.microlife.com.ua

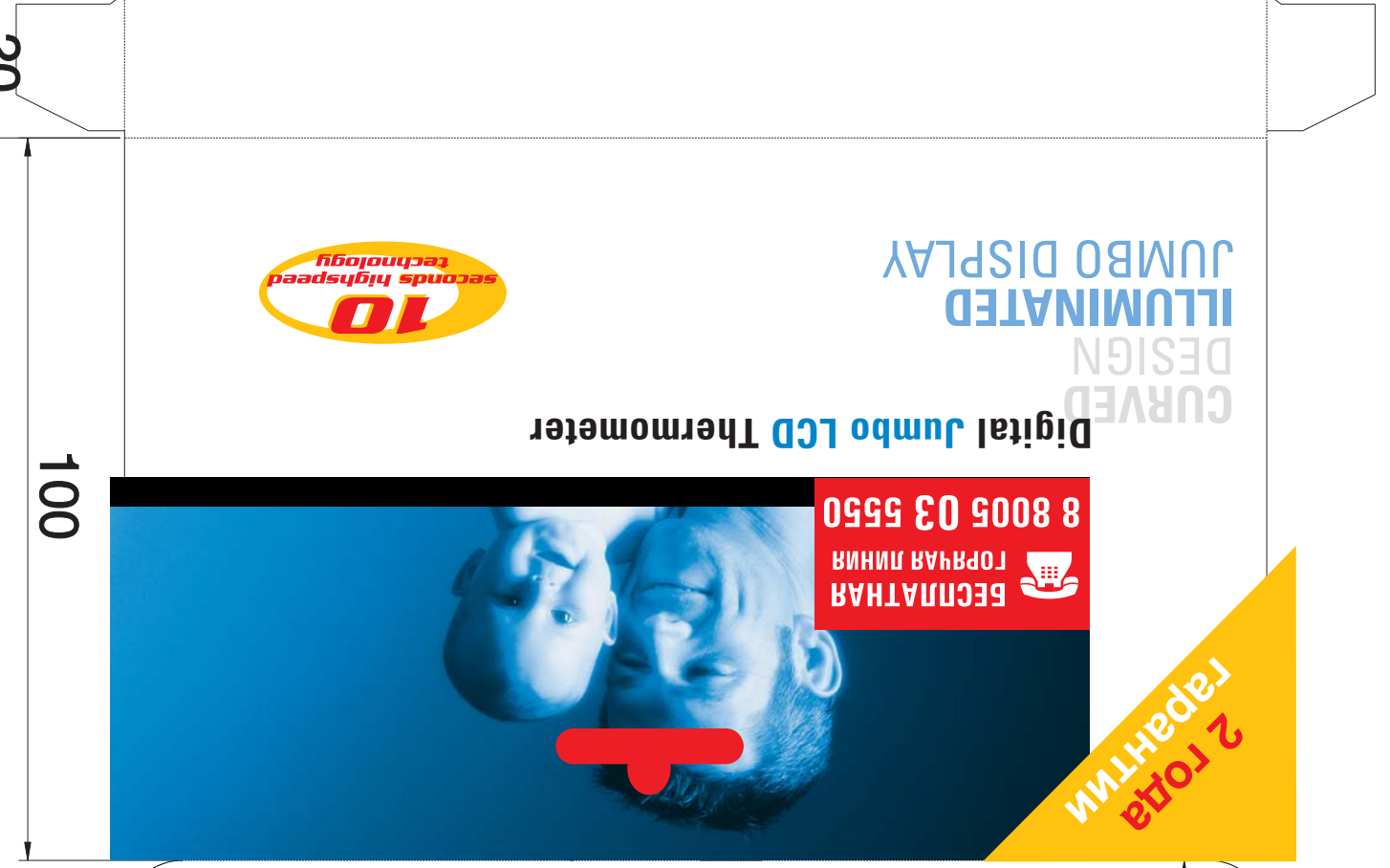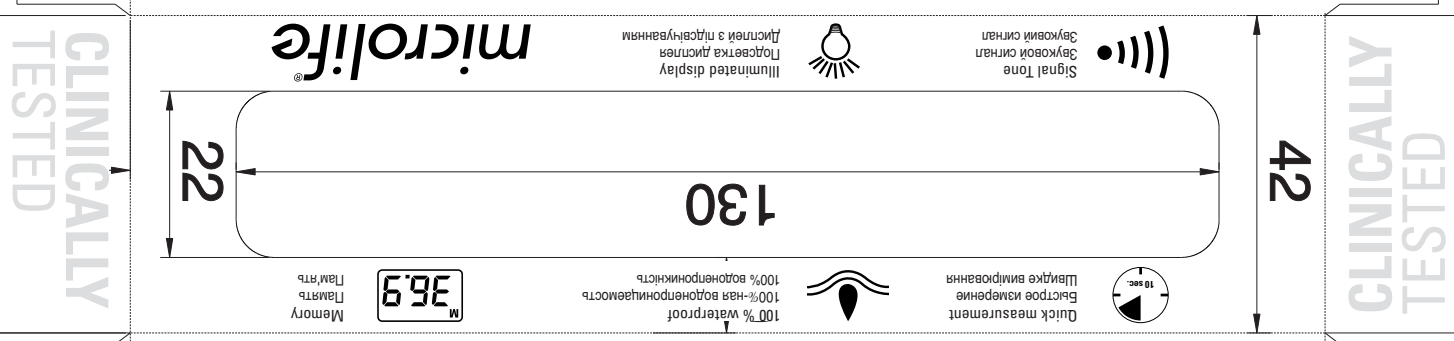

DIGITAL JUMBO LCD THERMOMETER MT 1951

BB MT 1951 V3-UA 1308

DESCRIPTION OF THIS PRODUCT
Описание продукта
Опис термометра

Measuring sensor / Измерительный датчик / Вимірювальний сенсор

Display Field / Дисплей / Дисплей

Battery compartment cover / Крышка отделения для батарей / Кришка батарейного відсіку

ON/OFF button / Кнопка Вкл/Выкл / Кнопка УВІМК/ВИМКН

MEASURING METHODS / Способы измерения / Способи вимірювання			
Oral / орально / орально		20 seconds / 20 секунд / 20 секунд	Normal / 35.7 °C – 37.3 °C
Rectal / ректально / ректально		10 seconds / 10 секунд / 10 секунд	36.2 °C – 37.7 °C
Axillar / аксиллярно / аксиллярно		20 seconds * / 20 секунд * / 20 секунд *	35.2 °C – 36.7 °C

* 90 seconds after beeptone (depending on ambient temperature)
* 90 секунд после звукового сигнала (в зависимости от окружающей температуры)
* 90 секунд після звукового сигналу (в залежності від навколишньої температури)

CLEANING AND DISINFECTION / Очистка и дезинфекция / Очищення і дезинфекція	
Name / средства / Засоби	Immerse / Погружение / Занурення
Isopropyl alcohol 70%	max. 24 hours
Спирт этиловый для наружного применения	Макс. погружение на 24 часа
Спирт этиловый для внешнего застосування	Макс. занурення на 24 години

Термометр медицинский электронный
Термометр медичний електронний

BATTERY REPLACEMENT / ЗАМЕНА БАТАРЕИ / ЗАМІНА БАТАРЕЇ

When the «▼»-symbole appears, battery is exhausted and needs replacing. Please remove the compartment lid of the thermometers and replace the exhausted battery by positioning the + at the top.

Появление в правом нижнем углу дисплея символа «▼» означает, что батарея исчерпала свой ресурс и нуждается в замене. Замените использованную батарею, установив новую полюсом «+» вверх.

З'явлення на дисплеї символу «▼» (перевернутий трикутник) означає, що батарея розряджена і потребує заміни. Для заміни батареї зніміть кришку батарейного відсіку з термометра. Вставте нову батарею полюсом «+» догори.

Вироблено під наглядом фізіївці Мікролайф АГ Швейцарія / Віднау Еспен Штрассе, 139, 9443/ тел. +41 71 727 70 00 електронна адреса: admin@microlife.ch – на виробничий МІСРОLІFЕ Corporation R.O.C. Представництва: м. Київ, вул. Васильківська, 1 оф. 403 тел. 201-65-89. м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська 27/31, корп. 1, тел. (0562) 34-22-06

Microlife AG
Espanstrasse 139
9443 Widnau / Switzerland
Tel. +41 / 71 727 70 30
Fax +41 / 71 727 70 39
Email admin@microlife.ch
www.microlife.com / www.microlfie.com.ua

SWISS DESIGN

