

- 1 Tipka ON/OFF (uključivo/isključivo)
- 2 Zaslona
- 3 Poklopac odjeljka za bateriju (strana)
- 4 Mjerni senzor

Važne sigurnosne upute

- Uredaj se smije koristiti samo za mjerjenje telesne temperature!
- Bez iznimke se mora održavati minimalno vrijeme mjerjenja do oglavljanja zvuka!
- Djeca ovaj uredaj ne smiju upotrebljavati bez nadzora; neki dijelovi su dovoljno mali da mogu biti pogutani. Obratite pažnju na postojanje rizika od davanja u slučaju da uredaj posuđuje kablave ili cevi.
- Pravilan rad ovog uredaja može biti narušen ukoliko ga koristite u blizini jakih elektromagnetskih polja, poput mobilnih telefona ili radio instalacija. Zato se preporučuje razstojanje od 1 m. Ukoliko procenite da je ovakva upotreba neizbjegljiva, provjerite da li uredaj pravilno radi pre upotrebe.
- Zaštite topomer od udara i pada.
- Izbegavajte savijanje vrha za više od 45°!
- Izbegavajte ambijentalne temperature iznad 60 °C. NEMOJTE stavljanjem instrument u ključavu vodu!
- Koristiti samo komercijalne dezinfekcije navedene u odjeljku »Čišćenje i dezinfekcija« da biste očistili topomer.
- Preporučujemo da svake četiri godine uklonite mehaničko udarec (npr. u slučaju pada) testirate da li topomer obavlja tačno mjerjenje. Molim Vas kontaktirajte Microlife-Servis da biste ugovorili o testiranju.
- Baterije i električni aparati moraju biti uklonjeni u skladu sa lokalnim važećim pravilima, ne sa opadom iz domaćinstva.

Ako je topomer uklonjen, izloži ga reciklaži.

Ako je topomer uklonjen, izloži ga reciklaži.