



Beschreibung des Thermometers

DE

- 1 Ein-/Aus-Taste
2 Display
3 Messsensor / Messspitze
5 Reinigungs- und Desinfektionsbereich (gesamte Thermometeroberfläche)

Sicherheitshinweise

• Befolgen Sie diese Gebrauchsanweisung. Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zum Betrieb und zur Sicherheit dieses Geräts.
• Benutzen Sie das Gerät nicht zur Messung der Körpertemperatur des Menschen im Mund, Rektum oder in der Achsel verwendet werden.

ACHTUNG: Das von diesem Gerät angezeigte Messergebnis ist keine Diagnose! Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf das Messergebnis.

Batterien und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll, sondern müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

Vor Verwendung Bedienungsanleitung genau studieren.

Anwendungsteil des Typs BF

Inbetriebnahme des Thermometers

Zum Einschalten des Thermometers die Ein-/Aus-Taste (1) drücken. Ein Display-Test wird durchgeführt. Alle Segmente sollten angezeigt sein.

Funktions-test

Nach jedem Einschalten des Thermometers wird automatisch ein Funktionstest durchgeführt. Bei einer Fehlfunktion (ungenaue Messung) erscheint «ERR» im Display, und es kann keine weitere Messung ausgeführt werden.

Bedienung

Wählen Sie die bevorzugte Messart. Während der Messung wird die aktuelle Temperatur laufend angezeigt und das «°C» Zeichen blinkt. Wenn der Signalton 10-mal ertönt und das «°C» nicht mehr blinkt, ist der Temperaturanstieg kleiner als 0,1 °C in 16 Sekunden.

Messwert-speicher

Wenn beim Einschalten des Thermometers die Ein-/Aus-Taste (1) für mehr als 3 Sekunden gehalten wird, erscheint der bei der letzten Messung automatisch gespeicherte Temperatur-Höchstwert.

Messarten / Normale Körpertemperatur

Unter dem Arm (axillär) / 34,7 - 37,3 °C
Wischen Sie die Achselhöhle mit einem trockenen Tuch ab. Platzieren Sie den Messsensor (3) unter dem Arm in der Mitte der Achselhöhle.

In der Mundhöhle (oral) / 35,5 - 37,5 °C
Essen oder Trinken Sie 10 Minuten vor der Messung nichts Heißes oder Kaltes.

Im After (rektal) / 36,6 - 38,0 °C
Achtung: Zur Verhinderung der Rektalperforation bei Kindern (unter 3 Jahren) empfehlen wir die Verwendung einer anderen Messmethode oder die Verwendung eines Thermometers mit flexibler Spitze.

Reinigung und Desinfektion
Verwenden Sie zur Desinfektion im Heimgebrauch einen Isopropylalkohol-haltiger (70%) oder ein mit 70% Isopropylalkohol angefeuchtetes Baumwolltuch, um Oberflächenverschmutzung von der Thermometer Messsonde abzuwischen.

Aufgebrauchte Batterie
Sobald im Display das Symbol «▼» (umgedrehtes Dreieck) erscheint, ist die Batterie aufgebraucht und der Thermometer muss ersetzt werden.

Technische Daten

Table with 2 columns: Typ, Messbereich, Messgenauigkeit, Betriebsbedingungen, Aufwahrungsbedingungen, Batterie, Batterie-Lebensdauer, IP Klasse, Verweis auf Normen, Durchschnittliche Lebensdauer.

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der Richtlinie für Medizinische Geräte 93/42/EWG

Garantie

Für dieses Produkt gilt eine lebenslange Garantie ab Kaufdatum. Während der Garantiezeit repariert oder ersetzt Microlife, nach eigenem Ermessen, das defekte Produkt kostenlos.

Für dieses Produkt gilt eine lebenslange Garantie ab Kaufdatum. Während der Garantiezeit repariert oder ersetzt Microlife, nach eigenem Ermessen, das defekte Produkt kostenlos.

Beschrijving van deze thermometer

NL

- 1 AAN/UIT knop
2 Display
3 Meetsensor
5 Reinigungs- en desinfectiegebied (gehele thermometeropper-vlak)

Belangrijke veiligheidsinstructies

• Volg de instructies voor correct gebruik. Deze documentatie voorziet u van belangrijke bedienings- en veiligheidsvoorschriften betreffende dit apparaat.
• Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor het meten van de lichaamstemperatuur van de mens via orale, rectale of axillaire.
• Gebruik dit apparaat niet als u vermoedt dat het beskadigd is of als u iets ongebruikelijks heeft opgemerkt.

WAARSCHUWING: De gemeten temperatuur met dit apparaat is geen diagnose! Vertrouw dus niet enkel op het gemeten resultaat.

Batterijen en elektronische instrumenten moeten volgens de plaatselijke regelgeving worden verwijderd, niet bij het huis-houdelijke afval.

Lees alvorens dit apparaat te gebruiken de instructies aandachtig door.

Geleverd onderdeel type BF

De thermometer aanzetten

Om de thermometer aan te zetten drukt u de ON/OFF knop (1) in. Een display test wordt uitgevoerd. Alle functiemogelijkheden worden weergegeven.

Bij een kamertemperatuur van minder dan 32 °C, verschijnt eerst het symbool «L» in het display, vervolgens knippert het symbool «°C» in het display (2). De thermometer is nu gereed voor gebruik.

Functietest

De werking van de thermometer wordt elke keer automatisch getest wanneer hij wordt aangezet. Als er een defect wordt geconstateerd (meting onnauwkeurig), wordt dit aangegeven door «ERR» in het display, en meten is dan niet meer mogelijk.

Gebruik van de thermometer

Kies de gewenste meetmethode. Bij het uitvoeren van een meting wordt de huidige temperatuur continu weergegeven en het «°C»-symbool knippert. Als de thermometer 10 keer piept en de «°C»-niet meer knippert, betekent dit dat de gemeten temperatuurstijging minder is dan 0,1 °C in 16 seconden.

Opslaan van gemeten waarden
Als de ON/OFF knop (1) langer dan 3 seconden wordt ingedrukt, wordt de thermometer ingeschakeld en zal de automatisch opgeslagen maximum temperatuur van de laatste meting worden weergegeven.

Meetmethoden / Normale lichaamstemperatuur

Onder de oksel (axillair) / 34,7 - 37,3 °C
Dep de oksels af met een droge handdoek. Plaats de meetsensor (3) onder de arm in het midden van de oksel, zodat de punt de huid raakt en plaats de arm naast het lichaam.

In de mond (oraal) / 35,5 - 37,5 °C
Eet of drink niets warm of koud 10 minuten voor de meting. De mond moet gesloten blijven tot 2 minuten voordat u begint met de meting.

In de anus (rectaal) / 36,6 - 38,0 °C
Let op: Ter voorkoming van rectale perforatie bij kinderen (jonger dan 3 jaar) raden wij aan een andere meetmethode te gebruiken of een thermometer met flexibele punt te gebruiken.

Reinigen en desinfecteren
Gebruik voor desinfectie in een thuisomgeving een wattenstaafje met 70% isopropylalcohol om vuil van de thermometer sonde te verwijderen.

Legge batterij

Wanneer het symbool «▼» (omgekeerde driehoek) aan de rechterzijde van de display verschijnt, is de batterij leeg en moet de thermometer vervangen worden.

Technische specificaties

Table with 2 columns: Type, Meetbereik, Meetnauwkeurigheid, Werkingscondities, Bewaarcondities, Batterij, Levensduur batterij, IP Klasse, Verwijzing naar normen, Verwachte levensduur.

Dit apparaat komt overeen met de normen van de richtlijn medische hulpmiddelen 93/42/EEC.

Garantie

Dit apparaat heeft een levenslange garantie vanaf de aankoopdatum. Tijdens deze garantieperiode zal Microlife het defecte product gratis repareren of vervangen.

Opening van of wijzigingen aan het apparaat maken de garantie ongeldig. De volgende items zijn uitgesloten van garantie:
• Transportkosten en transportrisico's.
• Schade veroorzaakt door onjuist gebruik of niet-naleving van de gebruiksaanwijzing.

