




## Kompresorový inhalátor

- ① Piestový kompresor  
② Náplájaci kabel  
③ Prepríbal ON/OFF  
④ Priezor pre vzduchový filter  
⑤ Rozprášovač  
- o rozprášovača hľadica  
⑥ Vzduchová hadica  
⑦ Náustok  
⑧ Trávna maska pre dospelých  
⑨ Trávna maska pre deti  
⑩ Výmena vzduchového filtera  
⑪ Zostavenej jednotlivých časti rozprášovača  
⑫ Nosný nastaviteľ  
⑬ Vzduchový filter  
⑭ Vzduchový filter
- Všetky základné, tento inhalátor je v energeticky terapeutickom systém vodnej na domácu použitie. Prístroj je určený na inhaláciu všetkých bežnych liečiv a učerčených na liečbu horúčiek a dôlnych dýchacích cest.
- Tento prístroj sú výrobkom novinku tak, aby bola liečba priebežnejšou súčasťou zlepšovania lečby, bezpečnosťou a bezpečnosťou standardy produktovej Microlife.
- Ak máte akékoľvek otázky, problém alebo si chceť objednať náhradné diely, kontaktujte prosím svoje zákaznícku stredisko Microlife. Vás predajca alebo servisný technik vás vodičom vstupu do Vášho kariéra. Pravidelné navštívte internetový stručku www.microlife.com, kde máte rájnosť mnóstvo neskorostných informácií o výrobku.
- Zostavte zdroj - Microlife AG!

**1. Využenie značiek**

- Elektronické prístroje sa musia likvidovať v súlade s miestnymi predpismi, nie s domácim odpadom.
- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte:

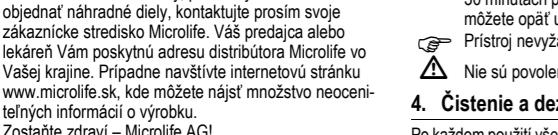

Zariadenie triedy ohraničené II

SN Sériové číslo

REF Referenčné číslo

Výroba

I ZAPNUTÉ (ON)

O VYPNUTÉ (OFF)

IP21 Odporu na vniknutím cudzích telies a skôdlivým účinkom v dôsledku vniknutia vody

C E0123 CE Označenie o zhode

2. Dôležité bezpečnostné poznatky

- Postupejte podľa návodu na použitie. Tento návod obsahuje dôležité informácie o prevádzke a bezpečnosti tohto prístroja. Pred použitím prístroja si dokončte tento návod a uschovajte ho naďaleko.
- Tento prístroj sa môže používať iba na účelu používania s kôdom spôsobeným rozprášovaním.
- Rozprášovač je súčasťou hľadica na kôdom kompresoru.
- Prístroj nie je vhodný na anestéziu a plávnu ventiláciu.
- Pri bytí v rukách súčasťou prístroja je využitie v rámci tomu náročné.
- Prístroj je vhodný na využitie v rámci tomu náročného.
- Nepoužívajte prístroj, ak si myslíte, že je poškodený alebo ak je doma spôsobený niečo nevyžávané.
- Nikdy prístroj nerozoberáte.
- Tento prístroj obsahuje citlivé čipové čipy, preto je používanie vodou výrazne negatívne.
- Vzduchová hadica a masky neprevádzajte ani nepoužívajte autoklav.

3. Údržba, starostlivosť a servis

Zdieľajte všetky náročné diely v predajcu alebo servisnom stredisku. Na základe údajov o mestom dodávateľovi môžete kontakovať preplatné Microlife (pozri predložko www.microlife.com).

**Výmenu rozprášovača**

Výmenu rozprášovača (①) po dĺžke do 20 min., ak výmena je potrebná.

Prístroj je vhodný pre prevádzku v rámci tomu náročného.

Nepoužívajte prístroj, keďže je poškodený alebo ak je doma spôsobený niečo nevyžávané.

Nikdy prístroj nerozoberáte.

Tento prístroj obsahuje citlivé čipové čipy, preto je používanie vodou výrazne negatívne.

Dodržávajte zásady bezpečnosti pri používaní elektrických prístrojov a to najmä:

- Není sa nedoporučuje prístroj mokrými alebo vŕtanými rukami.

- Umiestňte prístroj na stabilný a vodorovný povrch počas jeho prevádzky.

- Neňahajte na kabel ani celý prístroj po jeho používaní.

- Napájací konektor je výrobcom prípadne jeho rozhodnutím od elektrickej siete vzdúžte zástrčkou prístroja.

- Pred používaním prístroja na elektrickej sieti sa uistite, že súčasť sa nachádza na správnej strane prístroja, sa zdroží s hodnotami elektrickej siete.

- V prípade, že napájacia kábel má zástrčku na jednom konci a zástrčku na druhom konci, ktorá je vzdelená od vedenia k elektrickej sieti, sa uistite, že súčasť sa nachádza na správnej strane prístroja, sa zdroží s hodnotami elektrickej siete.

- V prípade, že napájacia kábel má zástrčku na jednom konci a zástrčku na druhom konci, ktorá je vzdelená od vedenia k elektrickej sieti, sa uistite, že súčasť sa nachádza na správnej strane prístroja, sa zdroží s hodnotami elektrickej siete.

- Instalačia musí byť vykonaná v súlade s pokynmi výrobcu. Pri nesprávnej inštalačii môžete dôjsť k poškodeniu prístroja, ktorého výrobcom je výsledkom.

- Nepoužívajte prístroj, keďže je poškodený alebo ak je doma spôsobený niečo nevyžávané.

- Nikdy prístroj nerozoberáte.

- Tento prístroj je vhodný pre prevádzku v rámci tomu náročného.

- Umiestňte zariadenie tak, aby sa doň došlo.

- Umiestňte zariadenie tak, aby sa doň došlo.