


MT 60

IB MT 60 EN-PT-AR 2026-04-06

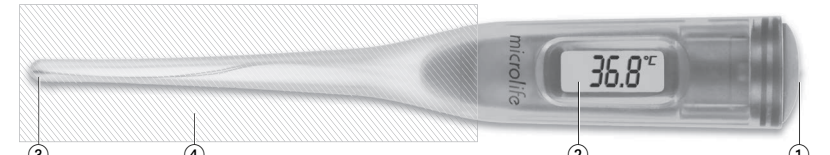

وصف ميزان الحرارة

- ١** زر التشغيل/الإيقاف
- 2** شاشة العرض
- 3** مجس قياس
- 4** منطقة التنظيف والتطهير (حساس الحرارة فقط)

الملحقات الاختيارية

غطاء مسبار للاستخدام لمرة واحدة للقياس الصحي:

تتوفر أغطية مسبار مايكرو لايف [Microlife] لقياس الحرارة الرقمي في صورة ملحق إضافي. استخدم أغطية مسبار متوافقة مع الجهاز للقياسات من أجل تجنب التلوث المتبادل بين أخذ القياسات والمرضى. قد يؤثر استخدام غطاء مسبار غير متوافق مع الجهاز على دقة القياس.

تركيب غطاء مسبار اختياري.

أدخل مقياس الحرارة جيدًا في غطاء المسبار وأزل غطاء حماية غطاء المسبار. بعد الانتهاء من القياس، أزل غطاء المسبار المستخدم وتخلص منه وفقًا للوائح المحلية المعمول بها.

تحذير: لا تعد استخدام غطاء المسبار. إن غطاء المسبار مُصمم للاستخدام مرة واحدة لمنع التلوث المتبادل.

تركيب الجهاز وإعداده

تُبثت البطارية مسبقًا في الجهاز. عندما يظهر رمز البطارية منخفضة «**٧**» على الشاشة، تكون البطارية فارغة وتحتاج إلى استبدال.

يوفر هذا المستند معلومات هامة حول العملية وسلامة هذا الجهاز. الرجاء قراءة هذه الوثيقة بعناية قبل استخدام الجهاز والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

معلومات هامة

وصف الجهاز:

مقياس الحرارة الرقمي هو جهاز طبي يستخدم مبادئ المبادئ الحرارية التوصيلي بين اتصال الجسم بالجهاز ومعالجة الإشارات الرقمية لحساب وتوفير قياس درجة حرارة الجسم.

الأعراض المقصودة:

يهدف الجهاز إلى قياس درجة حرارة الجسم.

المستخدمون المسمون باستخدام الجهاز:

تم تصميم الجهاز لتشغله من قبل البالغين والمراهقين الذين يتمتعون بالروية والوظائف الحركية والتعليب بالقدر الكافي والقادرين على فهم تعليمات الاستخدام وتشغيل الأجهزة الكهربائية المنزلية بشكل عام.

المرضى المعني باستخدام الجهاز:

المرضى المستهدفون هم عامة السكان من جميع الأعمار.

البيئة والشروط المخصصة لاستخدام الجهاز:

هذا الجهاز مخصصًا للاستخدام في بيئة الرعاية الصحية المنزلية (على سبيل المثال، بيئة منزلية عامة دون الحاجة إلى أشخاص مدربين طبيًا) من قبل المرضى (على سبيل المثال، للقياس الذاتي) أو من قبل أحد مقدمي الرعاية، وفي المنشآت الطبية المهنية (مثل عيادة الطبيب).

دواعي الاستخدام:

يقيس الجهاز حرارة الجسم بغرض الحصول على إشارات على:

فحص المرض والحالات المتعلقة بارتفاع أو انخفاض درجة حرارة الجسم.

موانع الاستخدام:

- هذا الجهاز غير مناسب للاستخدام في الأماكن التي يوجد بها التي بها أي جلد متضرر أو معرض للخطر.
- لا تحاول إجراء القياس من المستقيم عند الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في المستقيم.

تنبيه!

ملاحظة: تشير عناصر التنبيه إلى الحالات التي يُحتمل أن تكون خطيرة، وإذا لم يتم تجنبها، يمكن أن تؤدي إلى الوفاة أو إصابة المستخدم أو المريض بإصابات خطيرة أو بالغة.

- لا يمكن استخدام هذا الجهاز إلا لأغراض الموضحة في دليل التعليمات. لا تتمثل الشركة المصنعة مسؤولة أي ضرر يحدث بسبب الاستعمال الخاطئ.
- لا تعد نتائج القياس المستمدة من هذا الجهاز تشخيصًا طبيًا، وهي ليست مخصصة لتحل محل الاستشارة الطبية أو التشخيص الذي يقوم به أحد مقدمي الرعاية الصحية المحترفين (على سبيل المثال، طبيب أو صيدلي أو اختصاصي الرعاية الصحية الآخرين المرخصين). لا تستخدم هذا الجهاز بغرض التشخيص الذاتي أو العلاج الذاتي لحالة طبية. اطلب النصيحة من أحد اختصاصيي الرعاية الصحية على الفور إذا ظهر أن المريض ليس بحالة جيدة أو ظهرت عليه أعراض فيسيولوجية أو طبية.
- يحتوي هذا المنتج على بطارية زرية. يمكن أن تسبب البطارية الزرية التي يتم ابتلاعها حرقًا كيميائية داخلية في أقل من ساعتين وقد تؤدي إلى الوفاة. تخلص من البطاريات المستعملة على الفور. احتفظ بالبطاريات الجديدة والمستعملة بعيدًا عن متناول لأطفال / الرضع. إذا كنت تعتقد أنه قد تم ابتلاع بطارية أو وضعها داخل أي جزء من الجسم، فاطلب العناية الطبية الفورية.
- لا تحاول قياس درجة الحرارة من أماكن في الجسم غير المحددة في هذه التعليمات.
- تأكد بأن الأطفال لا يستعملون الجهاز بدون إشراف؛ بعض الأجزاء صغيرة بما فيه الكفاية بحيث يمكن ابتلاعها.
- لا تسير أو تركض عند قياس درجة الحرارة.
- لأسباب تتعلق بالسلامة (خطر انقباض المستقيم) يجب إجراء القياس من المستقيم عند الأطفال الأصغر من 3 سنة على يد موظفي الرعاية الصحية المدربين (المستخدم المحترف). استخدم طريقة قياس أخرى بدلاً من ذلك.
- لقياس حمى المستقيم في الأطفال الصغار الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات، تتوفر موازين حرارة مع مسبار مرن.
- يجب على المستخدمين المحترفين اتباع قانون الأجهزة الطبية المحدد المعمول به في البلد.

تحذيرات

ملاحظة: تشير عناصر التحذير إلى الحالات التي يُحتمل أن تكون خطرة، وإذا لم يتم تجنبها، يمكن أن تؤدي إلى إصابة المستخدم أو المريض إصابة طفيفة أو لا تُذكر أو التسبب في ضرر للممتلكات أو البيئة.

إذا كنت درجة حرارة المريض متأثرة بعامل آخر (مثل الحاضنة أو بطانية التدفئة)، فلا يجب استخدام نتيجة القياس التي يوفرها هذا الجهاز لتحديد وجود أو عدم وجود حمى.

يوصى باستخدام غطاء مسبار متوافق، أو تنظيف أو تطهير الجهاز قبل

ويعد القياس لتجنب التلوث «وصيانة الجهاز وكيفية التخلص منه» لمزيد من التفاصيل ارجع إلى قسم.

- لا تقم بعض أو مصنع أو ثنى مسبار الجهاز بشكل مفرط.
- لا تستخدم هذا الجهاز إذا كنت تعتقد أنه تالف أو لاحظت أي شيء غير عادي.

- معلومات التوافق الكهرومغناطيسي**
- يتوافق هذا الجهاز مع EN 60601-1-2 معيار الاضطراب الكهرومغناطيسي.

يوفر مزيد من الوثائق المتوافقة مع معيار التوافق الكهرومغناطيسي Microlife من على

www.microlife.com/electro-magnetic-compatibility

تحذير: لا تحاول إجراء أي صيانة أو معايرة للجهاز وملحقاته بنفسك.

التخلص

هذا جهاز كهربائي طبي. تخلص من هذا الجهاز والبطاريات وفقًا لتوجيه نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية واللوائح المحلية السارية. لا تخلص من الجهاز والبطاريات مع النفايات المنزلية أو التجارية.

الضمان

هذا الجهاز مغطى ب**ضمان 6** من تاريخ الشراء. خلال فترة الضمان هذه ، وفقًا لتقديرنا ، ستقوم Microlife بإصلاح أو استبدال المنتج المعيب مجانًا. فتح الجهاز أو تغييره يبطل الضمان. العناصر التالية مستثناة من الضمان:

- تكاليف النقل ومخاطر النقل.
- الضرر الناتج عن التطبيق غير الصحيح أو عدم الامتثال لتعليمات الاستخدام.
- تلف ناتج عن تسرب البطاريات.
- الضرر الناتج عن حادث أو سوء استخدام.
- مواد التعبئة والتغليف / التخزين وتعليمات الاستخدام.
- الفحص والصيانة الدورية (المعيرة).
- أكسسوارات وقطع غير: بطاريات.

في حالة ضمان الخدمة المطلوبة ، يرجى الاتصال بالوكيل الذي تم شراء المنتج منه ، أو خدمة Microlife المحلية. يمكنك الاتصال بخدمة Microlife المحلية من خلال موقعنا:

www.microlife.com/support

التعويض يقتصر على قيمة المنتج. سيتم منح الضمان إذا تم إرجاع المنتج بالكامل مع الفاتورة الأصلية. لا يؤدي الإصلاح أو الاستبدال ضمن الضمان إلى إطالة فترة الضمان أو تجديدھا. لا يقتصر هذا الضمان على المطالبات والحقوق القانونية للمستهلكين.

المواصفات والامتثال

المواصفات الفنية

اسم **الجهاز:**

رقم **الكتلوج:**

رقم **الموديل:**

وضع التشغيل:

مكان القياس:

مدى القياس:

دقة القياس المختبر

درجة الفعالية:

شروط التخزين والنقل:

البطارية:

عمر البطارية:

تصنيف الحماية من الدخول: IP67: مقاوم للغبار. محمي من آثار الغمر

الموقت في الماء.

الوزن:

العمر المتوقع:

معلومات الامتثال

يتوافق هذا الجهاز مع متطلبات توجيه الأجهزة الطبية 2017/745 (EU).

معايير الامتثال:

EN 60601-1-11: EN ISO 80601-2-56

ملاحظة: التعديلات الفنية محفوظة.

الرموز والتعريفات

 	إقرأ التعليمات بعناية قبل إستخدام هذا الجهاز.
 	جزء مطبق عليه نمط BF
 	تحذير
 	طب جهاز
 	رقم الموديل
 	رقم الكتلوج
 	رقم البنية (YYYY-MM-DD) ،YYYY-MM-DD = تاريخ الصنع)
 	الشركة المصنعة
 	بلد التصنيع (تاريخ التصنيع إذا كان التاريخ مطبوعًا بجانب الرمز)
 	وضع علامة CE المطابقة
 	الممثل المعتمد لـ في الاتحاد الأوروبي
 	الممثل المعتمد للجهاز في سويسرا

حدود درجة الحرارة لتشغيل أو التخزين

حدود الرطوبة لتشغيل والتخزين

التخلص من الجهاز وفقًا لتوجيه نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية.

المستورد

معرّف الجهاز الفريد

تحفظ بعيدًا عن أشعة الشمس

لاستخدام لمرة واحدة فقط

موقع معلومات المريض

غير مصنوع من المطاط الطبيعي

ابقه جاف

IP67: مقاوم للغبار. محمي من آثار الغمر الموقت في الماء.

IP67

CE1639